

AQUACEL® Hydrofiber® förband

Högabsorberande gelbildande förband

Innehåll

Hydrokolloidala fibrer bestående av 100% natriumkarboxymethylcellulosa

Egenskaper

- Hög snabb absorptionsförmåga
- Binder bakterier till sig
- Snabb gelbildning som skapar fuktig sårmiljö
- Skyddar nybildad vävnad
- Ger autolytisk såruppressning
- Begränsar sårsmärta
- Behåller sårvätskan i materialet
- Skyddar omgivande hud mot maceration
- Lätt att applicera och ta bort
- Tas bort i en sammanhängande bit
- Fastnar inte i torra sår

Indikationer

Måttligt till kraftigt vätskande sår t.ex. arteriella- och venösa sår, diabetessår, tagställen, sekundärläkande kirurgiska sår, även infekterade sår med samtidig systemisk antibiotikabehandling. Även till operationssår med viss blödning som t.ex. efter höftprotesoperation eller knäledsoperation tillsammans med plastfilm. Vid torra sår kan *AQUACEL* förfuktas med fysiologisk steril NaCl eller sterilt vatten.

Applikation

På såret samt ett 1-2 centimeter utanför såret. Sekundärförband i form av hydrokolloid *DuoDERM®*, plastfilm som *Tegaderm*, *Opsite* eller sekundärförband som *Pro Sårdyna* rekommenderas.

Storlek

Kompress 5x5, 10x10, 15x15, 4x10, 4x20, 4x30 cm

Band 2x45 cm

Leverantör

ConvaTec Wound Therapeutics™