

Allevyn: Non-adhesive; Adhesive, Sacrum; Plus Cavity

Polyuretanskumsförband

Innehåll

Hydrocellulärt polyuretanförband

Egenskaper

Allevyn består av tre lager: ett inte vidhäftande perforerat sårkontaktlager; ett högabsorberande mellanlager; samt ett semipermeabelt ytterskikt. Hanterar stora mängder sårvätska över tid genom absorption och avdunstning av vattenånga.

Allevyn Plus Cavity formar sig efter olika sårkaviteter, expanderar och fyller ut sårhålan, absorberar vätska och rengör sår, häftar mycket lätt och fastnar inte i sårkanter och kan avlägsnas smärtfritt utan att lämna rester i såret, behöver fixering och täckning, har hög vätskehanterande förmåga och absorberar samt håller kvar 430 ml/100 cm².

Allevyn Plus Adhesive har ett tjockare mellanskikt vilket innebär 50% högre absorptionskapacitet.

Indikation

Behandling av rena, kraftigt till måttligt vätskande sår av olika genes. Kan även användas som vätskehanterande förband över t.ex. *Iodosorb*, geler, alginat och silverförband såsom *Acticoat*. *Allevyn Plus Cavity* för kraftigt vätskande djupa sårhål i renings- och granulationsfasen

Fördelar

- hög vätskehanterande förmåga
- låg omlägningsfrekvens
- mjuk och formbar
- måttlig till kraftig uppsugande effekt
- absorberar även under kompression
- avlägsnas smärtfritt
- fastnar inte i såret
- lämnar inga rester i såret
- sårvätska hålls kvar i mellanskiktet vilket minskar risken för maceration samt läckage
- genomsläppligt för vattenånga, överflödigt sårsekret kan avdunsta utåt
- *Allevyn Sacrum* och *Allevyn Plus Adhesive* är vatten och bakterietäta

Tänk på

- Olämpliga till torra sår
- Alla *Allevyn* förbanden appliceras med den rosa sidan ut.
- Kan kombineras med sårgel eller *Acticoat* eller *Iodosorb*.

Applicering och byte

Allevyn Non-adhesive appliceras med 2 cm och *Allevyn Plus Adhesive* med 3 cm marginal utanför sårkanten. Det är dags att byta förbandet när sårsekretet nått 1 cm från förbandskanten på *Allevyn Non-adhesive* och 2 cm för *Allevyn Plus Adhesive*. Byt *Allevyn Plus Adhesive* inom 7 dagar och *Allevyn Sacrum* inom 5 dagar.

Vid behandling av tagställen – väl en bredare marginal, ca 3-5 cm från sårkanten.

Klipp *Allevyn Plus Cavity* så att cirka en tredjedel av sårhålan fylls från början och byt efter behov, täck gärna det rena såret med en genomskinlig film för att underlätta bedömning av bytesbehov. Till orena sår täcker man med kompress eller annat absorberande förband.

Storlekar

Allevyn Non-adhesive rulle 40x70 cm

Allevyn Plus Adhesive 12,5x12,5 cm

Allevyn Sacrum 17x17cm, 22x22 cm

Allevyn Plus Cavity 10x10 cm

Leverantör

Smith & Nephew AB