

Biatain Soft-Hold

Polyuretan skumförband

Innehåll

Semipermeabelt (bakterie- och vattentätt men med god avdunstning) skumförband med en paraffinbaserad självhäftande yta som täcker <50 % av ytan.

Indikationer

- För lite till kraftigt vätskande sår
- Smärtsamma sår
- Traumatiska sår
- Bensår, trycksår, diabetesfotsår
- Brännskador
- Tagställen
- Postoperativa sår samt för vissa akuta sår med skör hud runt såret

Egenskaper

- *Biatain Soft-Hold* absorberar och skapar en unik fuktig sårhämningsmiljö.
- Extra hand vid förbandsbyte
- Mindre smärtsamma förbandsbyten p.g.a. den paraffinbaserade ytan.
- Minskad maceration (uppluckrade sårkanter) p.g.a. den mycket goda absorptionen i kombination med pelott-effekten.

Applicering och bytesfrekvens

- Förbandet är enkelt att bandagera med men även att byta.
- *Biatain Soft-Hold* skumförband har ett mjukt, delvis häftande lager som hjälper förbandet att tillfälligt häfta på huden tills dess att sekundär- eller kompressionsförbandet har applicerats eller avlägsnats.
- Det går utmärkt att arbeta med handskar (non-touch metod). Bandaget ändrar färg när det är dags att byta. Färgen på bandaget ändras när sårsekret absorberas. Bandaget blir mörkt eller marmorerat. När denna förändring når kanten på bandaget är det dags att byta. Inga rester lämnas kvar i såret.
- Bytet bör ske inom en vecka.

Så här gör du

Rengör såret och torka försiktigt den omgivande huden. Ta bort skyddsfilm och applicera förbandet med den vita sidan mot såret. För att få full pelott-effekt är det viktigt att välja en storlek som går minst 2 cm utanför sårkanterna.

Storlekar

Biatain Soft-Hold

10x10cm, 10x20 cm och 15x15cm.

Leverantör

Coloplast AB