

CarboFlex® förband

Lukthämmande och absorberande förband

Innehåll, Egenskaper

Kombinationsförband med 5 olika skikt. I förbandets mitt återfinns en absorptionsdyna och en dubbelvävd struktur av aktivt kol. Runt denna del av produkten finns en EMA (etylen-metylakrylat)-film som hindrar sårvätskan att komma i direktkontakt med kolet. Mot såret ligger ett absorberande sårbeddsskydd av en 70/30 blandning av alginat/cellulosafibrer (*Kaltostat®/AQUACEL®*). En gel bildas mot sårytan. *CarboFlex* eliminerar obehaglig sårlukt och bibehåller fuktig sårmiljö.

Indikationer

Illaluktande, vätskande akuta och kroniska sår t ex. diabetesfotsår, infekterade sår, arteriella och venösa sår och cancersår.

Applicering och bytesfrekvens

Rengör såret. Debridera såret mekaniskt om det är täckt av nekrotisk vävnad. Torka omgivande hud. Välj ett *Carboflex*-förband som täcker såret med minst 3 cm marginal. Applicera *Carboflex* med den fibrösa delen (inte plast-filmen) mot såret. På ett ytligt sår läggs *Carboflex* direkt på såret och fixeras t.ex. med en engångsbinda. För djupa sår läggs *Carboflex* över en sårutfyllare/kavitetsförband t ex *AQUACEL®*. När förbandet är genomblött eller när luktabsorptionen har upphört byts det. Vid behandling av infekterade eller kraftigt vätskande sår - byt ofta.

Tag bort *Carboflex* genom att ta tag i kanten och lyft förbandet.

Storlekar

Storlek 10x10, 15x20 cm.

Leverantör

ConvaTec Wound Therapeutics™