

Mepilex: Lite; Border; Border Lite; Transfer

Absorberande silikonbelagt skum

Innehåll

Silikonbelagt (Safetac-yta) absorberande självhäftande skumförband med en film på ovansidan som är ångpermeabelt och vattentätt, *Mepilex Border* har en fixerande kant som består av Safetac (tunt ytskikt av silikon som fäster varsamt men och inte fastnar i såret). *Mepilex Transfer* har ett extra tunt skumskikt.

Egenskaper

Mepilex absorberar sårsekret effektivt och minimerar risken för maceration. Förbandet bibehåller en fuktig miljö. Silikonbelägningen minskar risken för förband att fastna och orsaka skada på sårytan och omkringliggande hud och därmed smärta. Fastnar inte på fuktig såryta men klibbar fast på torr hud. Skummet absorberar sårsekret även under kompressionsbehandling, löser inte upp sig och är formbart/klippbart. *Mepilex Transfer* fastnar inte på fuktig såryta, minimerar smärta och vävnadsskada och sårvätskan kan transporteras bort från såret.

- fastnar inte i fuktig såryta men klibbar fast på torr hud
- minimerar trauma och smärta vid förbandsbyten
- bibehåller fuktig sårmiljö
- följsamt och bekvämt
- minimerar risk för maceration
- sårsekret synligt genom förbandets yta, vilket gör det lättare att se när förbandet behöver bytas
- kan lyftas och justeras utan att förlora sina vidhäftande egenskaper
- kan klippas till rätt storlek
- ångpermeabel vattentät skyddsfilm skyddar förbandets yta och möjliggör steril applicering

Indikationer

Rena vätskande eller fibrinbelagda vätskande sår, speciellt till personer med känslig, skör lättirriterade hud runt såret. Granulerande och/eller epitelialiserande sår.

- Ben- och fotsår
- Trycksår
- Smärtsamma sår
- Traumatiska sår
- Sår med skadad eller ömtålig omkringliggande hud

Mepilex lite lämpar sig för olika typer av torra till minimalt vätskande sår, såsom fotsår hos diabetiker, fot- och bensår, traumatiska och smärtsamma sår, trycksår, strålreaktioner, brännskador och vid Epidermolysis bullosa. Kan användas som skydd på känslig hud, under kompression och i kombination med geler.

Mepilex Border lämpar sig framförallt för vätskande sår såsom trycksår, ben och fotsår och traumatiska sår.

Mepilex Border Lite lämpar sig för många typer av torra eller svagt vätskande sår, som ben- och fotsår, trycksår, traumatiska sår som skärsår och fingerskador och suturerade sår. Kan användas som skydd för skadad och känslig hud, under kompressionsförband.

Mepilex Transfer består av tunn polyuretan som skyddar ömtålig hud och släpper genom vätska.

Applicering och bytesfrekvens

Ta bort skyddsfilmen, rengör sårområdet, den klibbiga sidan mot såret, sträck inte förbandet.

Mepilex läggs över såret samt överlappar den omkringliggande huden med minst 2 cm.

Fixeras vid behov med binda. *Mepilex Border* används när skonsam fixering runt såret behövs som ett "allt-i-ett förband", man kan duscha med det.

Byt *Mepilex* efter behov, kan lämnas på såret i 7 dagar. *Mepilex Transfer* - efter rengöring av sårområdet torkas huden runt om av, den ena delen av skyddsfilmen tas bort, *Mepilex Transfer* bör överlappa den omkringliggande huden med minst 5 cm, ett lämpligt absorberande förband appliceras ovanpå och fixeras.

Storlek

Mepilex 10x10, 10x20, 15x15, 20x20cm

Mepilex Lite 10x10, 15x15, 20 x 50cm

Mepilex Border 7,5x7,5, 10x10, 15x15cm

Mepilex Border Lite 4x5, 7,5x7,5, 10x10, 15x15cm

Mepilex Transfer 15x20, 20 x 50cm

Leverantör

Mölnlycke Health Care AB