

Mepitel

Transparent, elastiskt, icke vidhäftande silikonnät

Innehåll

Elastiskt polyamidnät inneslutet i mjuk silikon

Egenskaper

Icke absorberande, följsamt, transparent, icke vidhäftande, silikonnät

- fastnar inte i fuktig såryta men klibbar fast på torr hud
- minimerar trauma och smärta vid förbandsbyten
- kan lämnas kvar flera dagar på såret
- genomskinligt förband underlättar inspektion
- följsamt och bekvämt
- mindre lämpligt till vätskande infekterade sår

Indikationer

- venösa, arteriella och diabetiska ben- och fotsår
- smärtsamma sår
- sår i granulationsfas
- ömtålig omkringliggande hud
- brännskador
- skrubbsår
- svårläkta sår
- transplantatfixering
- epidermolysis bullosa

Tänk på

Om produkten inte används rätt kan den ge avtryck t.ex. vid brännskador som behandlats med meshat transplantat eller vid ansiktsslipningar. Om *Mepitel* används på blödande sår eller sår med segt sårsekret skall det täckas med ett fuktigt absorberande förband. På brännskador som behandlats med meshat transplantat: undvik att utsätta förbandet för tryck

Applicering

Rengör sårområdet. Ta bort skyddsfilmen. Lägg på *Mepitel* på såret, ta bort övre skyddsfilmen och överlappa omkringliggande hud med 1-2 cm. Lägg på ett absorptionsförband.

Storlekar

5x7,5, 7,5x10, 10x18, 20x30cm.

Tillverkare

Mölnlycke Health Care AB