

Sorbact

Bakterie- och svampadsorberande förband

Innehåll

Hydrofob (vattenavvisande) substans: DACC (dialkylkarbamoylchlorid) applicerad på grönfärgad väv. Kompress och rundtork av acetatväv, tamponad av bomullsväv, absorptionsförband av acetatväv samt absorberande material.

Egenskaper

Genom hydrofob interaktion binds hydrofoba mikroorganismer (bl.a. stafylokocker, streptokocker, *E. Coli*, *pseudomonas*, *candida*) till *Sorbact* och lyfts ur såret vid förbandsbyte.

Indikationer

Orena, vätskande, koloniserade och infekterade sår samt svampinfektioner.

Tänk på

Använd inte feta produkter, i såret, samtidigt med *Sorbact* eftersom de kan motverka den hydrofoba effekten.

Applicering och bytesfrekvens

Sorbact skall vara i direkt kontakt med sårytan för att ha effekt.

Vid ytliga sår räcker det oftast med att applicera *Sorbact Absorptionsförband*.

Vid djupare sår - applicera en "fluffad" *Sorbact kompress* i såret och täck sedan med *Sorbact Absorptionsförband*, applicera den gröna sidan mot såret.

Sorbact tamponad lämpar sig bl.a. vid behandling av fistelgångar samt vid behandling av svampinfektioner mellan tår och i hudveck.

Byte av förband bestäms av hur mycket vätska såret avger.

Storlekar

Sorbact Absorptionsförband: 7 x 9, 10 x 10, 10 x 20 cm

Sorbact kompress: 4 x 6, 7 x 9 cm

Sorbact tamponad: 2 x 50, 5 x 200 cm

Rundtork: (Ø 3cm) 5 st

Leverantör

Abigo Medical AB