

Zipzoc Salvstrumpa *Apoteksvara*

Zinkstrumpa som innerförband i dubbelbandage

Innehåll

Elastisk vit trikåstrumpa impregnerad med zinkoxid 20%, vaselin och paraffin

Egenskaper

Fet, inte allergiframkallande (saknar konserveringsmedel) strumpa, med zinkoxid som läggs direkt på såret samt hela underbenet. Skyddar huden från det yttre klisterbandaget och fördelar trycket. Långtidsbandage har fördelen med kontinuerlig kompression under dygnet. Enstaka patienter har setts utveckla svampinfektion (candida) under salvstrumpan efter långvarigt användande vilket troligen beror på avsaknad av konserveringsmedel

Indikationer

Venösa bensår

Tänk på

Undvik dubbelbandage till patienter med uttalad arteriell insufficiens. Patienter med både venös och arteriell insufficiens bör ha ett ankeltryck på 80mm Hg eller ett ankelindex över 0,8.

Applicering och bytesfrekvens

Zipzoc Salvstrumpa dras på och skall ligga på från tåbas och avklippes nedom knät . Utanpå lindas en binda t.ex. en kohesiv binda (*CoPlus, Coban*). Dubbelbandage bytes vanligen 1g/vecka.

Storlekar

Zipzoc Salvstrumpa 10 styck 80 cm långa strumpor. Säljs på apotek med eller utan recept

Leverantör

Smith & Nephew AB